



Tessa Llimargas c/ Avellaner, 45
Gerente 08230 Matadepera
Barcelona _ España
Tel. 93 787 19 18
93 787 06 15
Fax 93 787 19 18
tecnico@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Pasos a seguir ante un paciente candidato a prótesis de avance mandibular. Índice de APNEA ligero o roncadador.

1. **Asegúrese de que el paciente es apto, para llevar la prótesis.
Realizar un rápido examen a nivel dentario, parodóntico, protésico y articular.**

Paciente no candidato sería:

- **Desdentado total.**
- **En el caso de ser desdentado parcial, si tiene menos de 8 piezas por arcada.**
- **En el caso de requerir tratamiento de alguna pieza dentaria, se hará previo a la colocación de la prótesis de avance.**
- **En el caso de parodontosis , requiere tratamiento por su dentista habitual, previo a la colocación del aparato.**
- **Quistes y aftas idem.**
- **Articulación temporomandibular, paciente con dolor, movilidad restringida, máxima protrusión menor a 5 mm..**

Pasos a seguir ante un paciente apto para una prótesis de avance mandibular.

2. **Toma de registro con alginato o silicona.**
 - **Las impresiones de ambas arcadas dentarias, superior e inferior, se tomarán con las prótesis puestas en boca (en caso de llevarlas).**
 - **Revisar atentamente la correcta reproducción de todas las piezas presentes.**
 - **Vaciar las impresiones, con yeso duro.**
3. **Evaluar la cantidad de avance mandibular posible.**
 - **Para encontrar la posición en la que se fabricará la prótesis, se usará el instrumento de registro GALGA DE GEORGE.**

Que consiste en : (Ver hoja adjunta)
4. **Obtener la conformidad del paciente sobre la prestación global que va a recibir.**
 - **Es importante que el paciente entienda y se comprometa con el tratamiento de avance mandibular que va a recibir, y que comprende:**
 - **Toma de registros y medidas necesarias para colocar la ortesis.***
 - **Colocación de la prótesis con una garantía de 12 meses, contra todo tipo de rotura, siendo su uso el adecuado.**
 - **Hasta 3 visitas de ajustes y retoques para optimizar el confort y la eficacia de la órtesis.**
 - **El precio habitual por este tipo de servicio , suele ser de 730 Euros por toda la prestación.**
5. **Preparar el caso en las cajas de transporte que le suministre ORTOTEAM, rellenando la hoja de prescripción adjunta, donde se detallan los datos identificativos de cada**

paciente y la fecha aproximada en la que se requiere tener la órtesis terminada.

6. Efectuar una llamada a la empresa de transporte MRW , para que pasen a recoger el caso y lo entreguen en Ortoteam. Los gastos de envío y devolución serán repartidos al 50 %.
Nuestra dirección de envío figura en las hojas de transporte suministradas con las de prescripción y cajas de embalaje.

* ortesis = prótesis de avance mandibular

INFORMACION GENERAL PARA EL PACIENTE

Su médico le ha recomendado la utilización de una prótesis de avance mandibular para el tratamiento del ronquido , y/o de la apnea del sueño.

Estos son algunos de los consejos y respuestas a las preguntas mas frecuentes:

¿ QUE DEBO HACER PARA CONSEGUIR TENER UNA ORTESIS DE AVANCE MANDIBULAR A MEDIDA ?

Tan solo un especialista en estomatología, odontología o cirujano dental, pueden realizar este proceso . La opción mas rápida consiste en concertar una visita con uno de estos especialistas preparados para la adecuada diagnosis y en su caso, toma de registro.

Solicítenos la lista de especialistas en la elaboración de Ortesis de avance mandibular , o bien consulte con su dentista habitual , que deberá contactarnos , para ser informado de los pasos a seguir.

¿ EN CUANTO TIEMPO PUEDO EMPEZAR EL TRATAMIENTO ?

La Ortesis ; es una prótesis que requiere prescripción sanitaria, hecha a medida por ORTOTEAM, Serán necesarias un mínimo de dos visitas por parte del dentista y un intervalo de unos 15 días, hasta que usted tenga la Ortesis colocada.

En la primera cita, el dentista se asegura de que Vd. puede llevar la Ortesis y en ese caso tomará los registros necesarios .

Es posible que el dentista le solicite realizar una serie de tratamientos previos a la colocación de la prótesis que su dentista habitual o el mismo dentista que le colocará la Ortesis podrán realizar.

En la segunda visita, posterior a la colocación de la Ortesis el dentista realizará una serie de ajustes , para mejorar la función y comodidad del aparato.

Posteriormente, visitas de control de 5 a 10 minutos de duración, pueden ser necesarias para optimizar la eficacia de la Ortesis.

¿ CUAL ES EL NIVEL DE EFICACIA DE LA ORTESIS ?

La experiencia clínica de los últimos 3 años, con varios cientos de pacientes tratados nos da los siguientes resultados :

- Disminución de los episodios de apnea – hipoapnea en un porcentaje promedio de un 60 %.
- Mejora de los síntomas de somnolencia diurna.
Eficacia en la disminución del ronquido en más de un 80 % de los casos.

¿ VA A CAUSARME ALGÚN DAÑO EL HECHO DE DORMIR CON LA ORTESIS PUESTA?

La Ortesis ha sido especialmente concebida par optimizar el nivel de confort y eficacia gracias a las siguientes innovaciones :

- Realizada unicamente con materiales blandos y elásticos .
- Poco voluminosa.
- Resultado conseguido mediante la retención de la mandíbula en posición avanzada dentro de un límite , de un 60 a un 90 % de su propulsión fisiológica.

La mayoría de pacientes llevan la Ortesis toda la noche y se lo quitan al despertar. pudiendo experimentar una ligera sensación de molestia articular o dentaria, que desaparece en unos 20 minutos, realizando sencillos ejercicios.

¿ CUANTO VALE UNA ORTESIS ?

El dentista fijará el precio por el conjunto de prestaciones que Vd. recibirá y que incluyen la Ortesis, la visita inicial, toma de registros y ajustes de la Ortesis . El precio es de 730 Euros . Considerando que la duración promedio de la Ortesis es de dos años , se trata de una inversión de 1 Euro al día.

¿QUÉ DEBO HACER UNA VEZ INSTALADA LA ORTESIS ?

Informe al médico que le recomendó el uso de la Ortesis , del inicio del tratamiento . Si sufre de Apnea del sueño, un registro del sueño, de control, le permite asegurarse de que la Ortesis está bien ajustada y así poder juzgar sobre la eficacia del tratamiento. La Ortesis es regulable y el dentista que le lleva puede ajustarlo, no dude en contactarlo si le parece que el confort o la eficacia pueden ser mejorados .

ortoteam.
Tessa Llimargas c/ Avellaner, 45
Gerente 08230 Matadepera
Barcelona _ España
Tel. 93 787 19 18
93 787 06 15
Fax 93 787 19 18
tecnico@ortoteam.com
www.ortoteam.com

Para mas información consulte nuestra web
www.ortoteam.com aptdo. Ortoteam Sleep

ortoteam.

Tessa Llimargas c/ Avellaner, 45
Gerente 08230 Matadepera
Barcelona _ España
Tel. 93 787 19 18
93 787 06 15
Fax 93 787 19 18
tecnico@ortoteam.com
www.ortoteam.com

El sistema de articulación ORM



**Minimiza el impacto
muscular y articular.**

**Férula completa que
permite un buen reparto
de los apoyos dentarios.**

IDEAL PARA PACIENTES CON PROBLEMAS

DE ACEPTACION DE APARATOLOGIA INTRAORAL

El sistema de articulación TAP -T



_Guía anterior milimetrada, con fácil ajuste.

Posibilidad de movimientos laterales.

Para pacientes con la mayor parte de dientes presentes.

ortoteam.

Tessa Llimargas c/ Avellaner, 45
Gerente 08230 Matadepera
Barcelona _ España
Tel. 93 787 19 18
93 787 06 15
Fax 93 787 19 18
tecnico@ortoteam.com
www.ortoteam.com
